


Ne pas remplir au-delà de la limite de remplissage

MODE D'EMPLOI

1. Ouverture : Appuyer avec le pouce sur la partie supérieure (fig.1).
2. Fermeture provisoire : Appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à le fermer sans le bloquer définitivement. (fig.2)
3. Fermeture définitive double sécurité : Appuyer fortement sur le volet; Pour s'assurer du verrouillage définitif, veiller à ce que le bord du volet soit bien bloqué sous l'ergot (fig.3) - 2ème sécurité : Enfoncer l'autre volet dans la fente jusqu'au verrouillage définitif (fig.4).

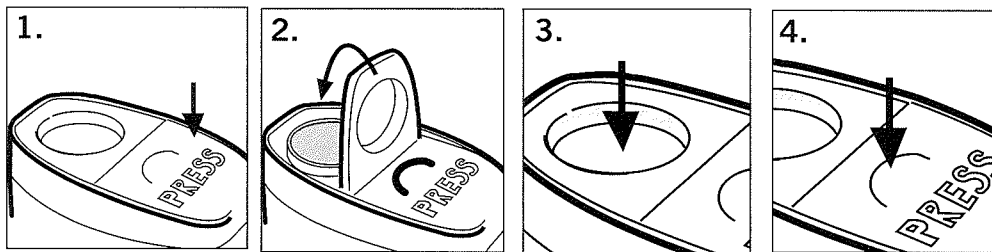

Conforme à la norme NFX30-500 et à son annexe A certificat de conformité délivré par le L.N.E le 23/07/02



Collecteur admis à la Marque NF-EMBALLAGES POUR DECHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS PERFORANTS

Fabrication contrôlée et validée par le LNE. N° Identification 01/01

AFAQ AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex



Risque biologique



Conforme à l'A.D.R. (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route).